

乳がん触診ミニモデル

取扱説明書

■ 内容物

- | |
|---------------------|
| (1) 乳がん触診ミニモデル … 1個 |
| (2) 取扱説明書 (本紙) … 1枚 |



認定NPO法人 J.POSH 事務局

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南2丁目6番3号
TEL: 06-6962-5071 FAX: 06-6962-0065
E-mail: info@j-posh.com URL: <http://www.j-posh.com>

製造元 株式会社 **レジーナ**

本社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-2
TEL.048(837)0204(営) FAX.048(837)0099
工場 〒019-1402 秋田県仙北郡美郷町野中宇下村107-2
TEL.0187(84)1516(代) FAX.0187(84)0591

■はじめに

乳がんのしこりの感触を体験することを目的として作成した「乳がん触診ミニモデル」です。

典型的なしこりを表現していますので、感触を覚えて自己検診を習慣づけてください。しこりや異常を見つけたら、乳腺専門医のいる「乳腺外科」か「外科」を受診してください。また、乳がんには、触っても分からないタイプもありますので、乳がん検診を受けることも大切です。

ご使用前には必ず本説明書をお読みください。

■ご利用方法

乳房モデルの中に、紫色に見えるものが乳がんを模したしこりです。約1cmのしこり2個と約2cmのしこりが1個埋まっておりますので、指の腹で押して硬さを確認してください。

■ご利用上の注意および保管について

- (1) 爪を立てて押すと製品の表面に細かい傷がつくことがございますので、ご注意ください。
- (2) 直射日光に当てたり、高温多湿な場所に長期保管すると、変形・変色することがありますのでご注意ください。
- (3) 煮沸や高温のお湯（60℃以上）につけたり、火気を近づけたりしないでください。
- (4) 有機溶剤や酸性薬品、アルカリ薬品等は使用しないでください。
- (5) 表面が汚れた場合はエタノールなどのアルコール類で拭き取ってください。
- (※) シンナー、クロロホルムなどの溶剤の使用は厳禁です。
- (6) 油性のマジックやサインペンなどは色が沈着して落とせなくなりますので、使用しないでください。
- (7) 当製品は消耗品であり、ある程度の経年劣化は否めませんのでご了承ください。

※この説明書(PDF)はダウンロード出来ます
右のQRコードよりスマートフォンでアクセスしてください→

